

THALYA



## L'IMPORTANZA DELLA MANUTENZIONE DI MANIPOLI E TURBINE.

Oltre ad essere i compagni di lavoro di ogni odontoiatra, questi strumenti rappresentano uno dei principali vettori di rischio legati alle contaminazioni crociate. Quando uno di questi dispositivi rallenta la sua rotazione o si arresta, subisce un risucchio di liquidi all'interno dei condotti (retrosifonamento).

È quindi opportuno da parte dell'operatore procedere alla pulizia, disinfezione, lubrificazione e, infine sterilizzazione dopo ogni utilizzo. Tale procedura è fondamentale anche per preservare la qualità dello strumento, un manipolo non mantenuto nel modo corretto è spesso soggetto a rotture o degrado anticipato.

## NOVITÀ

### THALYA

#### La manutenzione semplice

Thalya è la nuova alleata per la manutenzione degli strumenti rotanti. Semplice ed intuitiva, permette una perfetta manutenzione, tramite lubrificazione e spurgo, di turbine e manipoli.

Sarà sufficiente collegare l'aria compressa e l'alimentazione elettrica per poter immediatamente utilizzare la macchina.

**Lubrificazione e spurgo di 4 strumenti in meno di un minuto.**

Il ciclo di Thalya è composto da tre fasi:

- Spurgo dei condotti
- Lubrificazione
- Spurgo dell'olio in eccesso

Il trattamento di 4 strumenti contemporaneamente, ha una durata totale di circa 55 secondi.

La pulsantiera di controllo di Thalya permette un'interazione immediata con la macchina.



### THALYA PLUS

#### La manutenzione totale.

Thalya Plus ha tutte le caratteristiche di Thalya, con in più le funzioni di deterzione interna e disinfezione interna ed esterna.

Ha la possibilità di trattare in 12 minuti fino a 4 strumenti contemporaneamente: turbine, manipoli micromotori, detartaratori.

Il ciclo completo è composto da 6 fasi:

- Spurgo dei condotti
- Deterzione interna
- Disinfezione interna ed esterna
- Lubrificazione
- Spurgo dell'olio in eccesso
- Asciugatura

L'operatore ha la possibilità di personalizzare le fasi del ciclo.



THALYA



Guarda il video:



Per informazioni o scoprire le offerte in corso clicca qui:

